

CleanSpace™
RESPIRATORS
Free the way you breathe™

CST ULTRA

착용방법



CST ULTRA 착용방법

1



반면마스크의 모든 끈을 최대한으로 느슨하게 한다.
(사이드, 후면)

2



기기의 호스 길이 조절 버튼을 눌러 최대한 늘려줍니다.

3



CleanSpace 기기와 마스크 한쪽을 연결합니다.

*연결 시 후면의 필터 장착란의 'CleanSpace' 문구가 정상적으로 나타나도록 한다.

CST ULTRA 착용방법

CleanSpace™
RESPIRATORS
Free the way you breathe™

4



CleanSpace의 전원을 한번 눌러 대기상태로 만듭니다.

*초록색 LED가 들어오면 대기상태이며, 배터리 상태에 따라 초록색 LED는 1~3개로 나타납니다.

5



CleanSpace를 목 뒤로 두르고 반면 마스크의 머리끈을 머리에 씌여준다.

6



CleanSpace 기기 남은 한쪽을 마스크와 체결합니다.

CST ULTRA 착용방법

CleanSpace™
RESPIRATORS
Free the way you breathe™

7



CleanSpace 기기의 호스 길이를
얼굴에 맞게 조정해줍니다.


*호스 길이를 줄일 때는 버튼을 누르지 않고
마스크 연결부와 기기를 잡고 줄여주면 됩니다.

8



마스크가 잘 씌워졌는지,
기기의 착용에 불편함은 없는지
확인합니다.

9

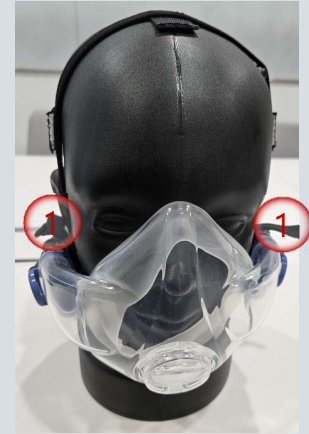

마스크가 얼굴에 밀착되도록 사이드
끈을 당겨준다.

CST ULTRA 착용방법

10




마지막으로 뒷 부분의 끈을 기기와
체결한 후 당긴다.

11



기기와 마스크가 움직이지 않는지,
정확하게 밀착되었는지 움직이며
확인한다.

12

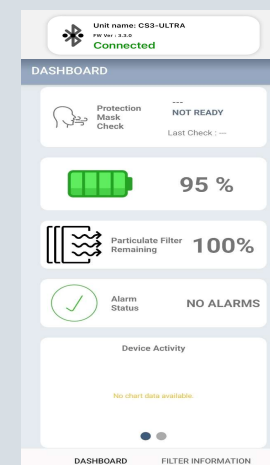

정상적으로 호흡이 되는지 확인한
다.

CleanSpace Smart App으로
배터리 및 필터의 잔량을 확인이
가능합니다.

CST ULTRA 착용 해제 방법

1



CleanSpace 기기와 후면 끈의
체결을 해제해 줍니다.

2



CleanSpace와 마스크가 연결된
한쪽 체결을 해제합니다.

3



반면마스크의 머리끈을 머리에
서 분리해주며 마스크를 벗는다.

착용방법

- 반면마스크의 모든 끈을 최대한 느슨하게 한다.
- CleanSpace 기기의 호스 길이를 최대한 늘려준다.
- CleanSpace 기기와 한쪽을 연결한다.
- CleanSpace의 전원을 on 하여 대기상태로 만든다.
- CleanSpace를 목 뒤로 두르고 반면마스크의 머리끈을 머리에 둘러준다.
- CleanSpace 기기와 남은 한쪽을 연결한다.
- 마스크가 얼굴에 밀착되도록 사이드 끈을 당겨준다.
- 마지막으로 뒷 부분의 끈을 기기와 체결한 후 당긴다.
- 기기와 마스크가 움직이지 않는지, 정확하게 밀착되었는지 움직이며 확인한다.
- 정상적으로 호흡이 되는지 확인한다.

착용 해제 방법

- 뒷 부분에 기기와 체결된 끈을 해제한다.
- 기기와 연결된 한쪽의 체결을 해제한다.
- 반면마스크의 머리끈을 머리에서 분리해주며 마스크를 벗는다.